

CLEAR CHOICE

LT

INSTRUKCIJA

HCG nēstumo nustatymo tests (atliekams naudojant vidurinį šlapimą (midstream). Skirtas naudoti pacientei savarankiškai

PRODUKTO PASKIRTIS:

HCG nēstumo nustatymo tests naudojamas ankstyvam nēstumui nustatyti pagal chorioninio gonadotropino hormono (HCG) lygį moters šlapime.

SANTRAUKA IR APRAŠYMAS:

Besivystanti placenta pradeda gaminti hormoną HCG nēstumo metu netrukus po to, kai embrionas prisitvirtina prie gimdos gleivinės. Paprastai, naudojant nēstumo testą, padidėjusį HCG lygį moters šlapime galima nustatyti per 3–4 dienas po apvaisinto kiaušinėlio implantacijos.

Šis testas yra toks jautrus, kad gali būti naudojamas likus 6 dienoms iki kitų reguliarių mėnesinių pirmosios dienos, kai moteris jomis nesuserga (likus 5 dienoms iki planuojamos reguliarių mėnesinių dienos), bet kuriuo paros metu.

Kuo ilgesnis nēstumas, tuo didesnis HCG kiekis šlapime. Šis nēstumo testas, atliekamas naudojant vidurinį šlapimą, aptinka HCG šlapime, esant 10 mIU/ml (pagal tarptautinę matavimo sistemą) arba didesnei koncentracijai. HCG koncentracija nepastojusių moterų organizme paprastai yra 5,0 mIU/ml. Paskutinio menstruacinio laikotarpio metu, kai moteris nesuserga mėnesinėmis, šlapimo HCG lygis yra maždaug 100 mIU/ml, o didžiausias koncentracijos lygis – nuo 100,000 iki 200,000 mIU/ml – aptinkamas pirmojo nēstumo trimestro pabaigoje.

PAKUOTĖS TURINYS:

Kiekviename maišelyje yra:

1. HCG nēstumo nustatymo tests (naudojant vidurinį šlapimą)
2. Džioviklis (išmesti, nevalgyti)

Kiekvienoje dėžutėje yra:

1. Vienas folijos maišelis
2. Naudojimo instrukcija

SAUGOJIMAS IR TINKAMUMAS NAUDOTI:

Nēstumo testo rinkinį galima laikyti kambario temperatūroje (nuo 2 °C iki 30 °C) uždarytame folijos maišelyje iki nurodytos galiojimo pabaigos. Saugoti nuo tiesioginių saulės spindulių, drėgmės ir karščio.

ATSARGUMO PRIEMONĖS:

1. SKIRTAS NAUDOTI TIK IŠORINEI DIAGNOSTIKAI (IN VITRO), NE VIDINIAM VARTOJIMUI.

2. Prieš naudodami nēstumo nustatymo testą, atidžiai perskaitykite naudojimo instrukcijas.

3. Nenaudokite pasibaigus galiojimo terminui.

4. Nenaudokite nēstumo testo pakartotinai. Panaudojusius vieną kartą, išmeskite į šiukšlaidėžę.

5. Nenaudokite nēstumo testo, jei folijos maišelis pažeistas.

6. Atidarius folijos maišelį, nēstumo testas turi būti naudojamas nedelsiant. Ilgalais aplinkos drėgmės poveikis gali neigiamai paveikti produkto kokybę.

7. Išmeskite šlapimo mėginius ir panaudotus nēstumo testus, kas juose yra potencialiai pavojingų bakterijų. Venkite sąlyčio su oda.

8. Saugoti nuo vaiku.

TYRIMO ATLIKIMO TVARKA:

1. KADA GALIMA ATLIKI NĖSTUMO TESTĄ?

Šį nēstumo testą galite atlikti likus 6 dienoms iki pirmosios mėnesinių dienos (likus 5 dienoms iki numatytos reguliarių mėnesinių pirmosios dienos), bet kuriuo paros metu.

2. ŠLAPIMO MĖGINIŲ SURINKIMAS IR NAUDOJIMAS

Šlapimo mėginys turi būti surinktas į švarią ir sausą talpą. Geriausia naudoti pirmąjį rytinį šlapimą, nes jame paprastai būna didžiausia HCG koncentracija, tačiau galima naudoti ir bet kuriuo paros metu surinktą šlapimo mėginį.

3. KAIP ATLIKI NĖSTUMO TESTĄ

1. Sandarus folijos maišelis ir šlapimo mėginys turi būti naudojami kambario temperatūroje. Prieš pradėdami atlikti nēstumo testą, atidarykite folijos maišelį ir išimkite nēstumo testo lazdelę.



2. Viena ranka laikykite už apvaliojo dangtelio galo, kita ranka ištraukite nēstumo testo lazdelę.

3. Nukreipkite plonąjį lazdelės galą žemyn. Panardinkite jį į šlapimo srovę ir laikykite mažiausiai 10 sekundžių, kad visiškai sušlapytų. Kitas būdas: surinkite savo šlapimą į švarią talpą ir panardinkite pusę sugeriančiojo plonojo galo į šlapimą ir laikykite mažiausiai 10 sekundžių.

4. Uždėkite ant prietaiso dangtelį ir laukite, kol išryškės spalvotos juostelės. Priklausomai nuo HCG koncentracijos jūsų šlapimo mėginyje, teigiami test rezultatai gali pasirodyti jau po 40 sekundžių. Kad pasitvirtintų neigiamas rezultatas, reikia išlaukti visą testui skirtą laiką – 5 minutes. Praėjus 10 minučių, rezultatai gali būti netikslūs.

5. Panaudotą nēstumo testą išmeskite į šiukšlaidę. Jei įmanoma, supilkite panaudotą vidurinį šlapimą į specialią talpą, nes jame yra potencialiai pavojingų bakterijų.

4. KĄ REIŠKIA GAUTASIS REZULTAS

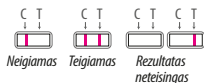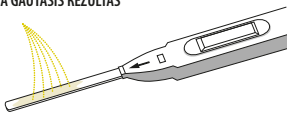

NEIGIAMAS: kontroliniame langelyje (C) matyti tik viena spalvota juostelė, o bandymo srityje (T) nėra nė vienos spalvotos juostelės. Tai rodo, kad tyrimo rezultatas yra neigiamas – HCG šlapime neaptikta. Vadinasi, jūs nesate nėščia arba testą atlikote per anksti. Jei nesate tikra, pakartokite testą per 48 valandas.

TEIGIAMAS: matote dvi spalvotas juosteles – viena bandymo langelyje, kita kontrolinėje srityje. Tai reiškia, kad testo rezultatas yra teigiamas. Vadinasi, didelė tikimybė, kad esate nėščia. Šlapime buvo aptikta HCG. Viena linija gali būti šviesesnė nei kita (jos neturi būti vienodos) – tai irgi teigiamas rezultatas.

REZULTATAS NETEISINGAS: nematyti jokių spalvotų juostelių arba tik viena spalvota juostelė bandymo srityje. Tai reiškia, kad testas atliktas netinkamai. Pakartokite nēstumo testą, naudodama naują rinkinį.

REAGENTAI:

1 folijos maišelyje yra 1 HCG nēstumo nustatymo tests (naudojant vidurinį šlapimą)
Sudedamosios dalys: prietaiso juostelės sudėtyje yra koloidinio aukso, padengto antikūnu β-HCG; NC membrana, padengta antikūnu α-HCG, išgautu iš pelių organizmo, ir antikūnu IgG, išgautu iš triušių ir pelių organizmo.

KAS GALI PAVEIKTI TYRIMO REZULTATUS:

1. Alkoholis gali turėti įtakos testo rezultatams. Pavartojus alkoholio, nerekomenduojama atlikti nēstumo testą.
2. Kartais šlapime esant mažiau nei 10 mIU/ml HCG testo rezultatas irgi gali būti teigiamas.
3. Atliekant nēstumo testą per anksti, HCG lygis šlapime gali būti dar nedidelis, todėl rezultatas gali būti neigiamas. Tokiu atveju testą reikėtų pakartoti mažiausiai po 48 valandų, naudojant naują šlapimo mėginį.
4. Moters organizme hormono HCG gali būti aptinkama net ir praėjus keletui savičių po gimdymo įprastu būdu ar taikant Cezario pjūvį, persileidimo ar aborto.
5. Esant labai didelei HCG koncentracijai (> 500,000 mIU/ml), net ir esant nēstumui, testo rezultatai gali būti neigiami dėl prozono efekto. Jei vis dėlto įtariate nēstumą, paprasčiausiai šlapimo mėginį atskieskite nejonizuotu vandeniu ir dar kartą atlikite nēstumo testą.
6. Jei šlapimo mėginys yra per daug atskiestas (pvz., jo savitasis svoris yra mažas), tyrimas gali neparodyti tikrojo HCG lygio. Jei vis dėlto įtariate nēstumą, atlikite nēstumo testą po 48 val. naudodama pirmąjį rytinį šlapimą.
7. Kaip ir atliekant bet kurį kitą tyrimą, rezultatus, gautus naudojant šį nēstumo testo rinkinį, turėtumėte palyginti su kitais klinikiniais tyrimų rezultatais, o dėl galutinės diagnozės pasitarti su gydytoju, prieš imantis bet kokių medicininių svarbių sprendimų.

Gamintojas: „FORANS Medical GmbH“, Martener StraÙe 275, 44379 Dortmund, Vokietija
Platintojas: SIA „FORANS Piepilsetas“, Krustkalni novads, Kekavas pagasts, LV-2111, Latvija, info@forans.lv



Skirtas naudoti diagnostikai in vitro



Saugoti nuo saulės spindulių.



testų skaičius
PAKUOTĖJE



Negalima naudoti pakartotinai



Visas atliekas šalinkite laikydami vietas taisyklių



Sunaudoti iki



Perskaitykite naudojimo instrukcijas



Laikyti 2–30 °C temperatūroje



Gamintojas



Laikyti sausoje vietoje.



Laikyti 2–30 °C temperatūroje



Pagamavimo data

Gaminio serijos numeris

REV-0/2019.03



0483